


	SOP		PENERIMAAN SAMPEL	
	Nomor	155/SOP/LABKES	Revisi	00
	Tanggal Terbit	01 April 2024	Halaman	1 / 4
KEPALA UPT LABKES KOTA BONTANG		 SAMRIAH, S.KEP., M.H NIP. 19750425 199803 2 003		
Pengertian		Suatu prosedur yang dilakukan laboratorium untuk memastikan sampel yang diterima memenuhi syarat untuk proses pemeriksaan.		
Tujuan		Untuk menjamin sampel yang diterima tidak mengalami kerusakan dan dapat digunakan sesuai dengan persyaratan pengujian.		
Kebijakan		Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Nomor: /SK/Labkes/2023 Tentang Pedoman Identifikasi Pasien UPT Laboratorium Kesehatan.		
Referensi		Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2023 Tetang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik.		
Alat dan Bahan		1. Surat pengantar pemeriksaan laboratorium 2. ATK 3. Komputer		
Prosedur/Langkah-Langkah		1. Petugas pendaftaran menerima sampel dan memastikan sampel yang diterima memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan. 2. Petugas Pendaftaran mendokumentasikan dalam Form Permintaan Pemeriksaan klinik atau lingkungan sesuai jenis sampel: - Nama pasien - Jenis kelamin - Usia/tanggal lahir - Nomor registrasi - Identitas pengirim / nomor telepon yang bisa dihubungi - Jenis pemeriksaan - Lokasi pengambilan sampel - Jenis sampel - Volume sampel - Tanggal dan jam pengambilan sampel		

k. Tanggal dan jam penerimaan sampel

l. Informasi tambahan jika diperlukan.

3. Petugas pendaftaran memberi kode registrasi, nama/pelanggan , tgl pengambilan pada sampel.
4. Petugas pendaftaran memberikan bukti pendaftaran untuk pengambilan hasil.
5. Petugas pendaftaran dapat menolak sampel apabila tidak memenuhi persyaratan sampel yang ditetapkan dan dikembalikan kepada pelanggan beserta alasan penolakan sampel tersebut.

Bagan Alir

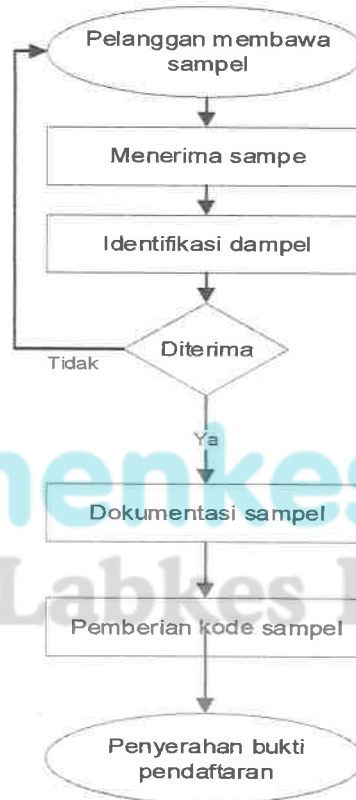

Hal—Hal Yang Perlu
Diperhatikan (Opsional)

Persyaratan Sampel

JENIS PEMERIKSAAN	SAMPel		ANTI KOAGULANT	WADAH	STABILITAS	KET
	JENIS	JUMLAH				
HEMATOLOGI Darah Lengkap (Hb, Lekosit, Eritrosit, MCV, MCH, MCHC, Hct, Trombosit) LED	Darah	2 ml	Na ₂ EDTA 1-1,5 mg/ml darah	G/P	Suhu kamar (2 Jam)	Volume sampel Sesuai volume tabung vakum EDTA
KLINIK Gula, Kolesterol, Asam Urat, Ureum, Kreatinin, HDL, LDL, Trigliserida, SGOT, SGPT	Serum	1 ml	-	G/P	20-25 °C (6 hari) 4 °C (6 hari) -20 °C (6 bulan)	
Urin rutin (pJ, BJ, protein, glukosa, urobilinogen, bilirubin, keton)	Urin pagi	15 ml	-	G/P	Suhu kamar (1 jam) 4-8 °C (1 hari)	
Sedimen urin	Urin	10 ml	-	G/P	Suhu kamar (1 jam) 4-8 °C (1 hari)	
Malaria	Darah segar	2 tetes kapiler (tetes tebal-tetes tipis)	-	G	Secepatnya	
Mikrofilaria	Darah segar	2 tetes kapiler (tetes tebal)	Na ₂ EDTA 1-1.5 mg/ml darah	G	Secepatnya	
Trichomonas	Sekret vagina/uretra	Secukupnya	-	-	Langsung dikerjakan	
Candida	Sekret vagina	Secukupnya	-	-	Langsung dikerjakan	
Kimia dan Fisika Air	Air	Minimal 1 5 Liter	-	Plastik bersih	Segera diperiksa atau ditambah pengawet yang sesuai	
Mikrobiologi	Air	Minimal 1 200 mL	-	Plastik atau kaca steril dengan penambahan Na Thiosulfat 3% atau 10%	Segera diperiksa	
Kimia Makanan	Makanan/Minuman	Minimal 1 100 mL/100 gr	-	Plastik bersih		
Mikrobiologi	Makanan/Minuman	Minimal 1 200 mL/200 gr	-	Plastik Steril	Segera diperiksa	

Unit Distribusi

1. Pendaftaran
2. Ruang Sampling
3. Laboratorium Klinik
4. Laboratorium Lingkungan

Catatan Revisi	Komponen Yang Diubah	Isi Perubahan
	-	-

